

Cod: SRT 222 – Orteză de încheietura mâinii mână fixă, TRIACARP JUNIOR

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mărimi	Stânga	Dreapta	Circumferința încheieturii mâinii (cm)	Lungime (cm)
1			10-12	18
2			12-14	20
3			14-16	22

**Indicații:** Se utilizează în entorse, luxații, artroze, sindrom de tunel carpian, paralizia nervului radial, fracturi la nivelul zonei, atât ca tratament ortopedic cât și postoperator.

**Descriere:** Orteză realizată din material textil, prevăzută cu:

- o atelă metalică palmară ce se poate modela
- o bandă de fixare în jurul articulației radiocarpene.

Închiderea se face cu scai, pe partea dorsală a mâinii.

Lungimea variază între 18-22 cm, în funcție de mărimea ortezei.

Orteza stabilizează și imobilizează articulația radiocarpiană.

**Compoziție:** Spumă poliuretanică (burete) acoperită pe ambele părți cu material textil: interior - bumbac 100%, exterior - poliamidă 100%.

**Poziționare:** Se așează orteza astfel încât atela metalică să sprijine palma, apoi se închide orteza pe partea dorsală a antebrațului, se fixează banda în jurul încheieturii mâinii și se reglează la nivelul optim de compresie.

**Curățare:**     

Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

**Depozitare:** La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

TALON DE GARANȚIE	
30 zile de la data cumpărării produsului.	
Codul produsului	
Data cumpărării	
Semnătura și ștampila vânzătorului	

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Producător: **TRIAMED** SRL

Sediul social

Comuna Sacoșu Turcesc, sat Uliuc, nr.262 C, Timiș / România  
Tel/Fax: 00 40 256 487388

[office@triamed.ro](mailto:office@triamed.ro)

[www.triamed.ro](http://www.triamed.ro)

Producție

Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A, Timișoara / Timiș / România  
Tel: 00 40 765 240037

[triamed@gmail.ro](mailto:triamed@gmail.ro)

