

TRIAMED

Cod: SRT 223 – Orteză de cot simplă, fără atelă, JUNIOR

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mărimi		Circumferința cotului (cm)	Lungime (cm)
1		16-18	20
2		18-20	22
3		20-22	24

Indicații: Se utilizează în entorse, luxații, contuzii.

Descriere: Orteză realizată din material textil.

Închiderea se face cu scai.

Orteza este un suport pentru articulația cotului, pe care o stabilizează și o protejează.

Compoziție: Spumă poliuretanică (burete) acoperită pe ambele părți cu material textil: interior - bumbac 100%, exterior - poliamidă 100%.

Poziționare: Se așează orteza astfel încât benzile cu scai să se închidă pe partea internă a brațului. Se reglează la nivelul optim de compresie.

Curățare:     

Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare: La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

TALON DE GARANȚIE

30 zile de la data cumpărării produsului.

Codul produsului

Data cumpărării

Semnătura și ștampila vânzătorului

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Producător: **TRIAMED SRL**

Sediul social

Comuna Sacoșu Turcesc, sat Uliuc, nr.262 C, Timiș / România

Tel/Fax: 00 40 256 487388

office@triamed.ro

www.triamed.ro

Producție

Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A, Timișoara / Timiș / România

Tel: 00 40 765 240037

triamed@gmail.ro

