

GENU REHA COOL ROM

Orteză de genunchi mobilă cu articulații reglabile

Ref. SRT 326

Indicații

Se utilizează pentru imobilizare postchirurgicală, controlul flexiei și extensiei articulației genunchiului, traumatisme ale articulației genunchiului sau fracturi minore.

Descriere

Orteza este realizată din material textil, deschisă anterior și este prevăzută cu:

- 2 atele metalice cu articulație mobilă, reglabilă, câte una pe fiecare parte. Articulațiile sunt ușor de accesat, fiind acoperite cu un capac din material plastic. Reglarea unghiului se face cu ajutorul a 2 cleme de fixare. Aceste cleme se acționează prin apăsare și mutare spre poziția dorită.

Posibilitățile de limitare a mișcării sunt:

- **flexie** 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°

- **extensie** 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

- 2 benzi de fixare prevăzute cu scai la nivelul gambei

- 2 benzi de fixare prevăzute cu scai la nivelul coapsei.

Lungime: 50 cm.


Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele două articulații laterale blocabile asigurând stabilitate și siguranță la utilizare.

Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a compresiei prin modul de închidere și prin cele 4 benzi de fixare.


Componentele textile pentru gambă și coapsă sunt reglabile în funcție de circumferință. Reglarea se face prin tăiere la nivelul cusăturilor transversale pentru a evita destrămarea materialului (cusătura rămâne pe orteză).

Compoziție

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.

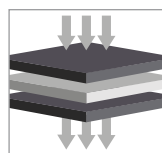

transfer de aer

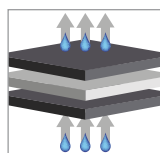

transfer de apă



- Culoare disponibilă:
negru

Mărimi disponibile

Mărime universală

Pentru circumferința genunchiului între 30 - 52 cm



Detalii produs



- orteză de genunchi cu articulație mobilă, reglabilă



- dispozitive de reglare accesibile



- închiderea se face cu scai