

## GENU REHA COOL ROM

Orteză de genunchi mobilă cu articulații reglabile

Ref. SRT 326

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed!

Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din materiale PREMIUM, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Produsele Triamed sunt înregistrate la Ministerul Sănătății și sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranța și performanța- și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

#### Mărimi disponibile

Mărime universală

Pentru circumferința genunchiului între 30 – 52 cm.

#### Indicații

Se utilizează pentru imobilizare postchirurgicală, controlul flexiei și extensiei articulației genunchiului, traumatisme ale articulației genunchiului sau fracturi minore.

#### Descriere

Orteza este realizată din material textil, deschisă anterior și este prevăzută cu:

- 2 atele metalice cu articulație mobilă, reglabilă, câte una pe fiecare parte. Articulațiile sunt ușor de accesat, fiind acoperite cu un capac din material plastic. Reglarea unghiului se face cu ajutorul a 2 cleme de fixare.

Aceste cleme se acționează prin apăsare și mutare spre poziția dorită.

Posibilitățile de limitare a mișcării sunt:

- **flexie** 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°

- **extensie** 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

- 2 benzi de fixare prevăzute cu scai la nivelul gambei

- 2 benzi de fixare prevăzute cu scai la nivelul coapsei.

Lungime: 50 cm.

Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele două articulații laterale blocabile asigurând stabilitate și siguranță la utilizare.

Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a compresiei prin modul de închidere și prin cele 4 benzi de fixare.

Componentele textile pentru gambă și coapsă sunt reglabile în funcție de circumferință. Reglarea se face prin tăiere la nivelul cusăturilor transversal pentru a evita destrămarea materialului (cusătura rămâne pe orteză).

#### Compoziție

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.

#### Poziționare

Orteza se așează din spate spre față, având grijă ca cele 2 articulații ale ortezei să fie poziționate în dreptul spațiului articular al genunchiului.

Articulațiile se reglează sau se fixează la indicațiile medicului. Se fixează cele 4 benzi prevăzute cu scai și se reglează la nivelul optim de compresie.

**Curățare**     

Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

#### Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

 **Producător**  
**SC TRIAMED SRL**

**Producție** Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

**Sediu social** Uliuc 262C | Sacoșu Turcesc | Timiș | România

**Telefon** 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 4, Revizia 2 /24.10.2023

## CERTIFICAT DE GARANȚIE

**Garanția legală de conformitate** conform **OUG 140 din 2021** privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora: **2 ani**

Pentru a corespunde cerințelor de conformitate, bunurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Respectă descrierea, tipul, calitatea și dețin funcționalitatea și alte caracteristici prevăzute în descrierile tehnice ale produsului (catalog, fișă tehnică sau instrucțiuni de utilizare);
2. Corespund scopului pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului și pe care vânzătorul l-a acceptat;
3. Sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu instrucțiunile de utilizare.

Vânzătorul declară că în caz de neconformitate a produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective, fără costuri, conform OUG nr. 140/2021.

Conform dispozițiilor legale, la achiziționarea produsului, vânzătorul are obligația de a explica modul de utilizare și întreținere a produsului furnizat. Cumpărătorul are obligația să verifice integritatea produsului, aspectul exterior și prezența în ambalaj a accesoriilor produsului înainte de finalizarea vânzării. Orice reclamație ulterioară referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioară și care ar fi putut fi sesizată la cumpărare nu va fi luată în considerare.

### **Garanția comercială a produsului: 30 zile.**

Măsurile corective în cazul defectului de fabricație sau deteriorare în garanție

Consumatorul are dreptul de a beneficia de:

1. Reparația produsului;
2. Dacă reparația nu este posibilă sau costurile implicate sunt disproporționale cu valoarea produsului, produsul este înlocuit
3. În cazul în care acțiunile corective de mai sus nu sunt posibile, se returnează clientului suma plătită la achiziționarea produsului.

Acțiunile corective se efectuează fără costuri pentru cumpărător.

### **Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.**

În cazul în care defectul este remediat prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția comercială se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adus la cunoștința garantului defectul până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul în care defectul este remediat prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile defecte, perioada de timp prevăzută în garanția comercială începe să curgă de la data înlocuirii.

**Data producției:** vezi eticheta ambalaj.

**Data valabilității:** fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării.

În cazul returnării unui produs defect cumpărătorul se adresează direct vânzătorului de la care a achiziționat produsul.

Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte împreună cu produsul defect următoarele:

1. Ambalajul individual al produsului
2. Bonul fiscal sau factura primită la achiziția produsului
3. Talonul de garanție inclus în instrucțiunea de utilizare.

În cazul în care produsul a fost achiziționat direct de la producător (TRIAMED SRL), sesizările și reclamațiile se pot trimite online, pe adresa de mail: [suportclienti@triamed.ro](mailto:suportclienti@triamed.ro).

<b>TALON DE GARANȚIE</b> 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului

 **Producător**  
**SC TRIAMED SRL**

**Producție** Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

**Sediu social** Uliuc 262C | Sacoșu Turcesc | Timiș | România

**Telefon** 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 4, Revizia 2 /24.10.2023