

# TRIAMED

## EASY HAND 01

Pernă cilindru scurt

Ref. TCA 06

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

#### Indicații

Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea confortului pacienților.

#### Descriere

Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren și fulgi de spumă poliuretanică, care permit circulația aerului.

Se reconfigurează rapid, schimbând zonele de presiune.

Dimensiuni: 14 cm x 30 cm.

#### Compoziție

Exterior - bumbac 100%, interior - perle polistiren și fulgi de spumă poliuretanică.

#### Poziționare

Pernă se așează sub segmentul de corp expus escarelor de decubit (braț, antebraț, coapsă, gambă, gât etc).

#### Curățare



Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

#### Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

**Garanția legală de conformitate** conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

**Garanția comercială a produsului: 30 zile.**

**Data producției:** vezi eticheta ambalaj.

**Data valabilității:** fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe ambalajul produsului.

**Termen de comunicare a soluționării:** 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: [suportclienti@triamed.ro](mailto:suportclienti@triamed.ro)

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>TALON DE GARANȚIE</b><br>30 zile de la data cumpărării produsului | Lotul și data fabricației:         |
| Referința produsului:  | Data cumpărării:                   |
| Motivul sesizării/reclamației:                                       | Semnătura și ștampila vânzătorului |



**Producător: TRIAMED SRL**

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A

Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

[office@triamed.ro](mailto:office@triamed.ro), [triamed@gmail.com](mailto:triamed@gmail.com)

[www.triamed.ro](http://www.triamed.ro)